

QuikRead go® vejledning til ændring af Hb-enhed til mmol/L

Opsætning af Hb patient resultat værdier:

- Vælg Indstillinger/Flowmåling/ Test Parametre
- Indtast admin password - QRG0SET
- Vælg CRP+Hb
- Hb enhed ændres til mmol/L



QuikRead go Software version 7.2.5 gør det muligt at vælge Hb enheder til rapportering af Hb resultater i **kvalitets kontrol** prøve målinger.

- Vælg Indstillinger/ Flowmåling/Egenskaber for QC-Lot
- Vælg Hb på test linien
- Indtast admin password - QRG0SET
- Vælg Hb enhed mmol/L



g/L
g/dL
mmol/L